

# Guide rapide ECG100S / ECG200S

## Contenu de l'emballage

1) ECG100S / ECG200S



2) Alimentateur



3) Adapt. Crocodile  
Set 10 pièces



4) Électrode à usage  
unique Ecg, tab, conf. 100  
pièces



5) Câble patient



6) Paquet de papier  
Z-Fold pour ECG



7) Sac




8) Réglage  
compteur  
fréquence



## 1 – Préparation du dispositif

- Ouvrir le logement du papier, insérer la **rame de papier**(6) dans l'appareil et refermer. Le signe noir doit se trouver vers le haut ;

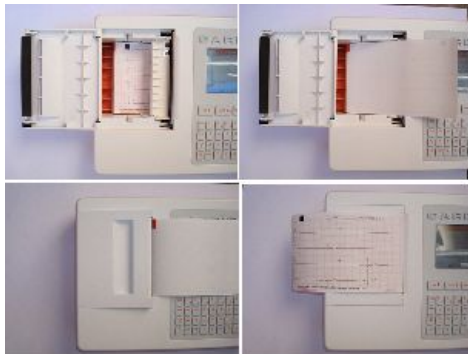

- Brancher l'**alimentateur** (2) dans la prise placée sur l'arrière de l'appareil et au réseau électrique ;



Un alimentateur


- Brancher le **câble patient** (5) à la prise sur le côté droit de l'ECG et le fixer en vissant les bornes ;






- Allumer** l'appareil en maintenant appuyée pendant quelques secondes la touche d'allumage.

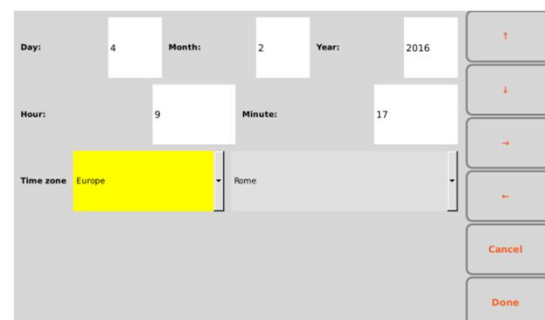


- Programmer la date et l'heure** : presser la touche **F6 Menu** puis la touche **F3 Date et heure**.
- Feuilleter le champs en utilisant les touches **F1 ↑** et **F2 ↓**.
- Programmer les valeurs en utilisant **F3 →** pour les augmenter et **F4 ←** pour les diminuer faire défiler une liste.
- Presser la touche **F6 Fait** pour confirmer

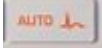


## 2 - Activer le mode Manuel ou Automatique

- Presser la touche  pour mettre en marche l'acquisition en mode **automatique**.
- Presser la touche  pour mettre en marche l'acquisition en mode **manuel**. Presser la touche  pour l'interrompre.
- Utiliser les touches fonction à droite pour modifier le format

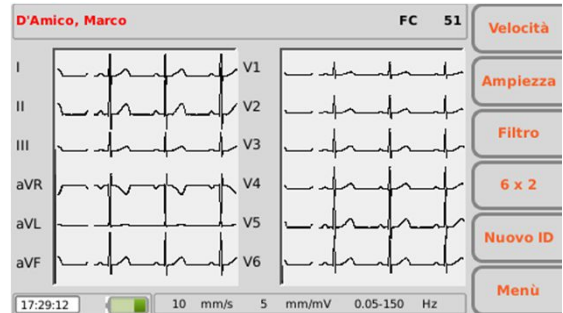


## 3 - Insérer les informations patient

- Il est possible d'insérer les informations patient avant ou après avoir effectué un enregistrement ;
- Pour insérer les informations presser la touche  ;
- Feuilleter le champs en utilisant les touches **F1** ↑ et **F2** ↓.
- Programmer les valeurs en utilisant le clavier alphanumérique ou la touche **F4** ← pour parcourir une liste ;

## 4 - Configurations de l'imprimante et de l'écran

- Il est possible de modifier le format d'affichage et d'impression en utilisant les touches fonction à droite :
- **F1 Velocità** : 5, 10, 25, 50 mm/s
- **F2 Ampiezza**: 2.5, 5, 10, 20 mm/mV
- **F3 Filtro**: filtre lowpass off, 40, 25 Hz
- **F4**: format d'affichage 6x2, 6x1 1st, 6x1 2nd, 6x2 3rd, 3x1 1st, 3x1 2nd, 3x1 3rd, 3x1 4th, 3x1 5° - le format sélectionné dans les configurations.

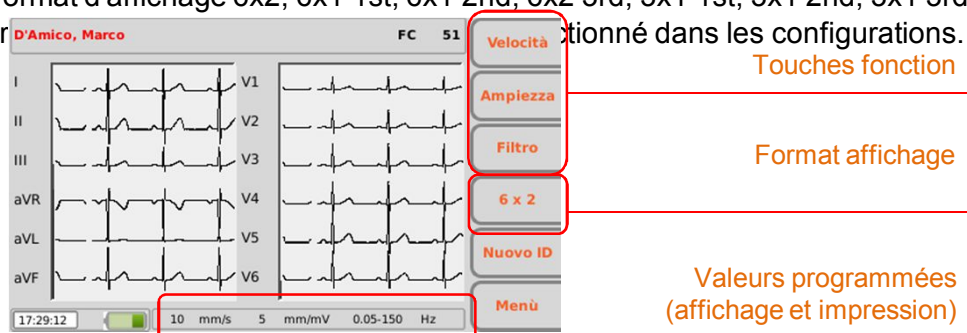

**Remarque** : pour les autres configurations et modes de fonctionnement se référer au manuel utilisateur.

## Cardioline S.p.A.

Via Fratelli Bronzetti, 8 - 20129 Milan (Italie)

Tél. +39 02 94750470 E-mail: [info@cardioline.it](mailto:info@cardioline.it) - [www.cardioline.com](http://www.cardioline.com)