


Vérifiez les signes d'arrêt cardiaque soudain : perte de conscience
 respiration anormale


1 TIREZ

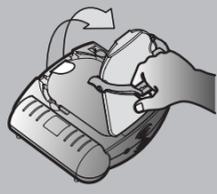

2 PLACEZ




3 APPUYEZ

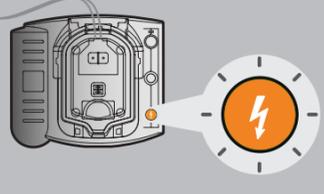

AIDE-MÉMOIRE


INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES

Pour commencer : Tirez la poignée.
Retirez les protections.

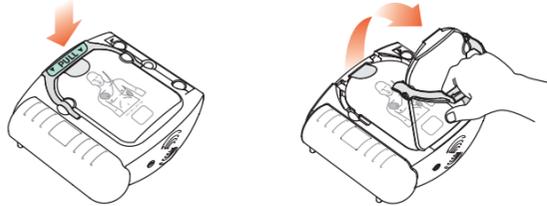


1

Mettez nu le thorax.
Nettoyez et séchez la peau, au besoin.

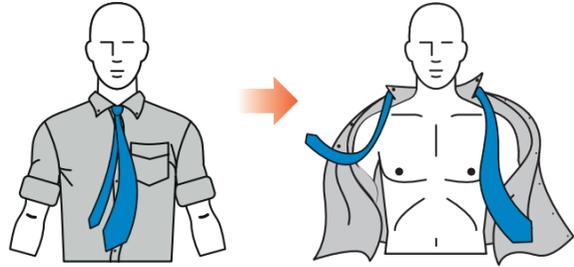


2

Découlez la pellicule adhésive et
sortez les électrodes de la cartouche.

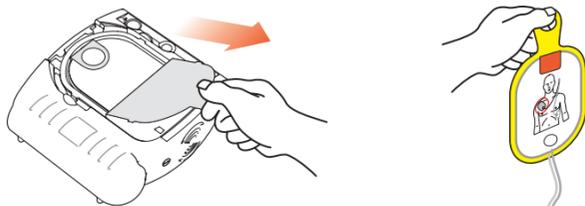


3

Découlez chaque électrode du revêtement jaune en plastique.

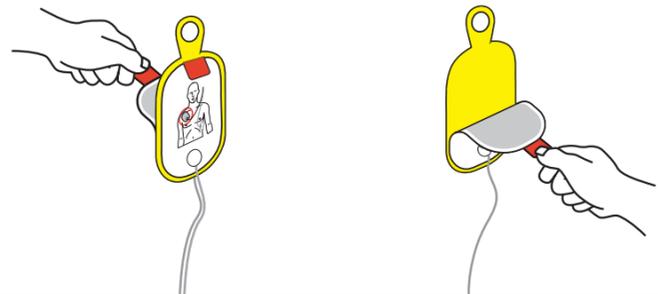

4

Placez les électrodes exactement
conformément à l'illustration.

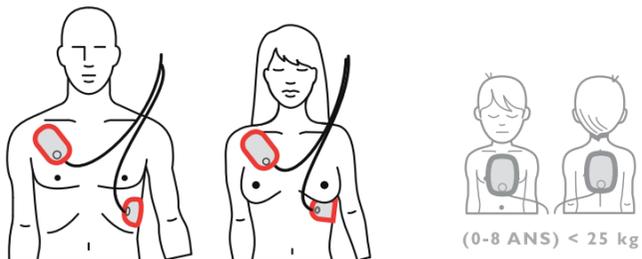


5

Analyse ... Ne touchez pas le patient!




6

Pour délivrer un choc : appuyez sur le bouton **ORANGE**
clignotant. Ne touchez pas le patient.

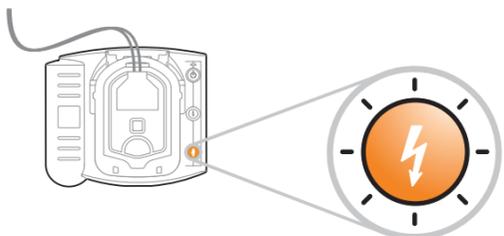

7

Pour l'aide à la RCP :
appuyez sur le bouton **BLEU** clignotant.

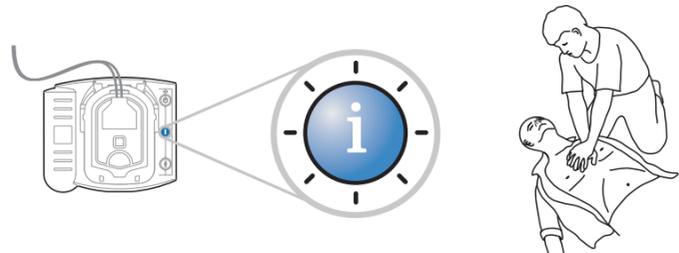

30 compressions • pincez le nez, penchez la tête • 2 inspirations complètes

8