



ORTHÈSE CORRECTIVE SOUPLE DE JOUR

INDICATIONS :

Le port de l'orthèse souple de jour EPITACT® aide à corriger la déformation et à limiter l'évolution de l'hallux valgus. Elle contribue à soulager les douleurs articulaires et les douleurs de contact avec la chaussure.

SPÉCIFICITÉS :

De par sa conception brevetée souple et ultra fine intégrant la technologie EPITHELIUM™FLEX, l'orthèse hallux valgus s'adapte facilement dans toutes les chaussures et se porte quotidiennement durant la journée.

ERGONOMIE:

Contrairement à une attelle hallux valgus rigide, elle agit lors de la marche sur tous les facteurs aggravant la déformation. Elle permet de redresser le gros orteil (le niveau de la correction est réglable) et de soulager les douleurs.

MISE EN PLACE :

Passer l'avant-pied dans le bracelet. Encapuchonner ensuite le gros orteil. Placer la pastille en Epithelium™ en arrière de «l'oignon».

CONSEIL :

En complément de l'orthèse corrective de jour, il est conseillé de porter l'orthèse corrective de nuit EPITACT®. Rigide, sur mesure elle limite la rétraction des ligaments et préserve le sommeil.

CONTRE-INDICATIONS :

L'orthèse hallux valgus ne doit pas être utilisée dans le cas où le gros orteil n'est plus mobile latéralement. Dans ce cas, utilisez plutôt la protection hallux valgus.

COMPOSITION :

Gel de silicone. Tissu polyamide élasthanne.

ENTRETIEN :

L'orthèse est lavable en machine à 30°C.



FONCTIONNEMENT DE L'ORTHÈSE CORRECTIVE SOUPLE DE JOUR



ORTHÈSE BREVETÉE

Le **tendon externe breveté en silicone EPITHELIUMFLEX®** (1) permet de redresser le gros orteil (le niveau de la correction est réglable). Il absorbe les pressions et ainsi soulage les douleurs.

Le **bracelet métatarsien de contention** (3) extra fin et la **pastille de contre-appui en Epithelium™** (2) permettent de limiter l'écrasement et l'élargissement de l'avant-pied.

ERGONOMIE ADAPTÉE À LA MARCHÉ



DISPONIBLE EN 3 TAILLES :

	Mesurez le contour du pied en arrière de l'hallux valgus.	Vendue à l'unité. (Si vous hésitez entre 2 tailles, choisissez la plus petite)		
		S 20 ≤  ≤ 21,5 cm	M 21,5 <  ≤ 23 cm	L 23 <  ≤ 24,5 cm
	REF ORTHÈSE JOUR 	0521	0522	0523

L'orthèse peut être portée indifféremment sur le pied droit ou le pied gauche.