



ORTHÈSE CORRECTIVE RIGIDE DE NUIT

INDICATIONS :

Le port de l'orthèse corrective de nuit EPITACT® aide à corriger la déformation et à limiter l'évolution de l'hallux valgus. Elle contribue à soulager les douleurs articulaires nocturnes et supprime les douleurs de contact.

SPÉCIFICITÉS :

De par sa conception brevetée, l'Orthèse Corrective se thermoforme facilement sur votre pied en quelques minutes. Elle est thermoformable plusieurs fois, vous pouvez ainsi réaxer progressivement votre orteil. Vous disposez ainsi d'une orthèse évolutive sur mesure très confortable. Légère et ultra fine, elle se fait oublier pendant votre sommeil.

CONSEIL :

En complément de l'Orthèse corrective de nuit, nous vous conseillons de porter l'Orthèse corrective de jour EPITACT® qui aide aussi à corriger la déformation et à soulager les douleurs articulaires.

CONTRE-INDICATIONS :

L'orthèse ne doit pas être utilisée dans le cas où le gros orteil n'est plus mobile latéralement. Ne pas appliquer sur une peau lésée. Ne pas utiliser en cas de diabète, d'artérite, de neuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères.

COMPOSITION :

Gel de silicone, Tissu polyamide élasthanne, Plastique thermoformable.

ENTRETIEN :

L'orthèse est lavable en machine à 30°C.



FONCTIONNEMENT DE L'ORTHÈSE CORRECTIVE RIGIDE DE NUIT



EFFICACITÉ PROUVÉE:

81%

des personnes
qui souffrent
sont soulagées

51%

en moyenne,
la douleur est
diminuée de 51%

89%

des utilisateurs
la trouvent
confortable

Enquête de satisfaction menée en 2016 sur 37 clients utilisant l'orthèse de nuit moulée.



ORTHÈSE A MOULER EN 10 MINUTES SEULEMENT en suivant les indications de la notice de thermoformage incluse dans le pack ou en visionnant la vidéo sur www.epitact.com Moulée sur votre pied et donc parfaitement adaptée à votre morphologie, l'orthèse se fait oublier pendant votre sommeil.

DISPONIBLE EN 3 TAILLES :

	Mesurez le contour du pied en arrière de l'hallux valgus.	Vendue à l'unité. (Si vous hésitez entre 2 tailles, choisissez la plus petite)		
		S 20 ≤  ≤ 21,5 cm	M 21,5 <  ≤ 23 cm	L 23 <  ≤ 24,5 cm
	REF ORTHÈSE NUIT	0511	0512	0513

L'orthèse peut être portée indifféremment sur le pied droit ou le pied gauche.