




Semelles Thérapeutiques JAMBES LÉGÈRES

INSUFFISANCE VEINEUSE - JAMBES LOURDES

INDICATIONS : Le port des SEMELLES JAMBES LÉGÈRES EPITACT® est préconisé en cas de troubles de la circulation sanguine des membres inférieurs, d'insuffisance veineuse, de varices débutantes.

SEMELLES THÉRAPEUTIQUES : En activant la pompe plantaire à chaque pas elles améliorent l'efficacité du retour veineux et soulagent les jambes lourdes.

UNE STRUCTURE UNIQUE* POUR UN EFFET IMMÉDIAT SUR LA POMPE PLANTAIRE

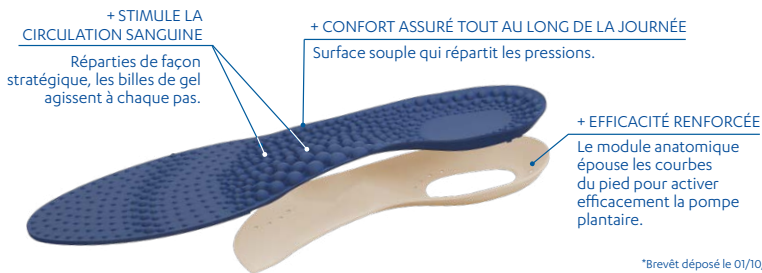

*Brevet déposé le 01/10/2022

CONSEILS D'UTILISATION : Fines et faciles à enfiler, les semelles sont compatibles avec toutes les chaussures fermées, jusqu'à 2,5 cm de talon. Ne pas utiliser avec ou à la place de vos semelles orthopédiques. Compatibles mais non substituables aux traitements médicamenteux et/ou aux dispositifs de compression médicale.

Si besoin, adaptez les semelles à votre pointure. Si vos semelles bougent dans vos chaussures, utilisez les pastilles de maintien fournies dans la boîte. Si des signes d'usure (déchirures) apparaissent après une période d'utilisation, remplacez les semelles.

CONTRE-INDICATIONS : Ne pas utiliser sur une lésion cutanée (plaie). Cas des personnes souffrant d'artérite, de phlébite, de diabète, de neuropathie des membres inférieurs ou d'allergie à l'un des composants : demandez conseil à un professionnel de santé, puis surveillez votre pied pendant l'utilisation. En cas de douleurs ou de réaction inhabituelle, contactez votre médecin. Tout incident grave lié à ce produit doit être déclaré au laboratoire Millet Innovation et à l'Agence Nationale des Produits de Santé (ANSM).

ENTRETIEN : Sortez les semelles de vos chaussures après utilisation. Lavez-les régulièrement à la main, à l'eau et au savon, nous recommandons de les laver après chaque utilisation.

COMPOSITION : 80,5 % SEBS, 19,5 % PP.

POINTURES	RÉF.	EAN	ACL
36 - 38	SE010	3660396020425	6363983
39 - 41	SE011	3660396020432	6363986
42 - 44	SE012	3660396020449	6363984