

Laboratoires URGO
FICHE TECHNIQUE ET DE SPECIFICATIONS

ALGOPLAQUE

PANSEMENT HYDROCOLLOÏDE STERILE HAUTE PROTECTION

❑ COMPOSITION :

- La couche externe est un support semi-perméable en polyuréthane, imperméable à l'eau et aux bactéries.
- La couche interne est composée de particules hydrocolloïdes (carboxyméthylcellulose) insérées dans un réseau élastomère.
- Stérilisation par rayonnements ionisants β .

❑ PROPRIETES :

- Au contact de la plaie, les particules hydrocolloïdes d'ALGOPLAQUE absorbent les exsudats, gonflent pour former un gel de comblement doux et humide, favorable au processus cicatriciel en terme d'hydratation, de température et de pH.
Ce gel non-adhérent évite que le tissu cicatriciel soit endommagé lors des renouvellements de pansements.
- La grande souplesse et l'excellente adhésivité aux pourtours de la plaie permettent à ALGOPLAQUE d'épouser les différentes régions anatomiques.
- La transparence du support permet le contrôle permanent de la formation et de l'aspect du gel.
- Les pansements de la gamme ALGOPLAQUE sont perméables à l'air et imperméables à l'eau et aux bactéries. Ces propriétés autorisent la poursuite des bains ou des douches, assurent la protection de la plaie vis-à-vis des contaminations extérieures, et permettent les échanges gazeux, favorisant ainsi le drainage des exsudats.
- Stériles.

❑ INDICATIONS :

- Soins locaux des plaies chroniques au stade de bourgeonnement (escarres et des ulcères de jambes).

❑ CONTRE - INDICATIONS :

- Ne pas utiliser en cas d'infection.

❑ CONSEILS D'UTILISATION :

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas utiliser en cas de détérioration du protecteur de stérilité.
- L'utilisation d'ALGOPLAQUE sur une ulcération d'origine veineuse ne dispense pas du traitement compressif éventuellement prescrit.
- Durée de conservation : 5 ans.

MODE D'EMPLOI :

⇒ **Préparation de la plaie :**

- Nettoyer la plaie selon les techniques habituelles.
- Sécher soigneusement avec une compresse stérile, en particulier sur le pourtour de la plaie.

⇒ **Application du pansement :**

- Oter le film de protection
- Appliquer sur la plaie sans tension, en évitant de toucher la face adhésive avec les doigts.
- Lisser le pansement doucement sur la plaie et plus fermement à la périphérie.

⇒ **Renouvellement du pansement :**

- *Au stade du bourgeonnement* : Sur une plaie propre, uniformément détergée, ALGOPLAQUE sera renouvelé tous les 3 à 4 jours en moyenne selon l'importance de l'exsudation.
- Pour un retrait indolore, effectuer un retrait tangentiel en étirant le support parallèlement à la plaie.
- Au retrait du pansement, le fond de l'ulcération cutanée peut être recouvert d'un enduit gélatineux qui s'élimine facilement par simple lavage.
- Dans le cas d'une plaie très fortement exsudative, l'écoulement de substance gélatineuse autour du pansement nécessite son renouvellement.

□ **PRESENTATIONS :**

CODE	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	GROUPE
2881	10 cm x 10 cm	boîte de 16 pansements	10 boîtes
5845	15 cm x 15 cm	boîte de 10 pansements	10 boîtes
5843	20 cm x 20 cm	boîte de 10 pansements	10 boîtes

□ **DONNEES TECHNIQUES :**

NATURE DES CONTROLES	SPECIFICATIONS
Définition	Pansement adhésif constitué d' hydrocolloïdes naturels appliqués sur un support PU et protégés par un protecteur.
Aspect de la masse	Masse homogène de couleur crème à ocre, sans bulles et non tachée.
Scellage et pelabilité	Aucun décollement ou défaut au niveau de la zone de scellage. Ouverture à la main aisée.
Pouvoir adhésif tangentiel	< ou = 2,5 mm
Absorption après 1 heure	> ou = 800 g/m ²
Stérilité (rayonnements ionisants β)	Stérile

DONNEES SCIENTIFIQUES*	VALEURS
Imperméabilité aux bactéries	Protection pendant la durée de pose préconisée dans la notice
Imperméabilité à l'eau	pas de fuites
Epaisseur totale	860 µm
Grammage total	960 g / m ²
Cohésion du gel	> 70 %
pH	7,0
MVTR	1500 g/m ² / 24 h 4500 g/m ² / 48 h 7000 g/m ² / 72 h
Capacité d 'absorption	1300 g/m ² / 1 h 6000 g/m ² / 24 h 7000 g/m ² / 48 h

* données à titre informatif - ne constituent pas des spécifications de contrôle

□ **STATUT REGLEMENTAIRE :**

- Dispositif médical marqué CE 0459.
- Inscrit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

*ALGOPLAQUE a été conçu et est fabriqué par les
Laboratoires URGO - 21300 CHENOVE - FRANCE*