

<i>Description générale</i>	Bracelet d'identification inviolables pour adultes et enfants.		
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo, et schéma technique	
<i>Référence lot</i>	Oui	Voir sur la boîte	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non		
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Oui	Mono patient pendant l'utilisation puis jetable	
<i>Dispositif stérile</i>	Non		
<i>Stérilisation</i>	Oui	À l'oxyde d'éthylène et chimique. Pas à air chaud ou gamma	
<i>Autoclavable</i>	Non		
<i>Nettoyage</i>	Oui	Avec une solution n'attaquant pas le PVC, au détergent	
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant le PVC comme le l'acétone, le benzène, le chloroforme.		
<i>Pièces constitutives</i>	Oui	Un bracelet, une étiquette et un stylo permanent.	
<i>Matières</i>	En PVC pour le bracelet et en papier pour l'étiquette.		
<i>Standard fabrication</i>	S.O.		
<i>Étiquetage</i>	Oui	Nom, référence, lot, usage unique, quantité.	
<i>Emballage</i>	Oui	Boîte en carton	
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre.	
<i>Durée d'utilisation</i>	Moyenne		
<i>Marquage sur le DM</i>	Non		
<i>Références</i>	16 105 46	16 106 40	16 106 41
<i>Désignation</i>	Adulte	Enfants rose	Enfant bleu
<i>Dimensions Lo x la x la2 (mm)</i>	250 x 25 x 12	170 x 19 x 12	
<i>Diamètre d'utilisation (mm)</i>	Max = 70 Min = 20	Max = 45 Min = 20	
<i>Résistance température (C°)</i>	-20 à +70°C		
<i>Épaisseur (mm)</i>	0.5		
<i>Poids net par 100 (g)</i>	334	232	
<i>Taux de reversions de flexibilité</i>	Rigide		
<i>Couleurs</i>	Transparent	rose	bleu
<i>Élasticité</i>	NS		
<i>Utilisation</i>	Dispositif inviolable permettant l'identification des personnes		
<i>Mode d'emploi</i>	Prendre un bracelet et inscrire le nom de la personne soit sur l'étiquette soit directement sur le bracelet avec le crayon feutre permanent. Insérer l'étiquette complètement, le nom vers l'extérieur et déchirer le bout qui dépasse. Installer le bracelet, la languette restante vers l'extérieur et choisissez la longueur voulue en insérant la pointe dans le trou choisi. Rabattez le capuchon et pressez jusqu'à entendre le bruit du clip. Vérifier si ce dernier est bien installé. Coupez si nécessaire la languette restante.		
<i>Précaution d'emploi</i>	Ce dispositif ne peut être utilisé que par une personne compétente et qualifiée. A utiliser en usage inique par personne, ne pas trop serrer le bracelet, risque de garrotage.		
<i>Recyclage/Récupération</i>	Oui / Dans les bacs de déchets médicaux.		
<i>DEEE/REACH</i>	Non/ NC		
<i>PVC/PHTALATES</i>	Oui/ Oui (DEHP)		
<i>Données de sécurités</i>	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul		